


Topiramaat in serum

Synoniemen	Topamax, Epitomax	
Analysemethode	LC-MS/MS (methode is gevalideerd)	
	In huis ontwikkelde diagnostiek	
Kwaliteitssysteem geïmplementeerd	ISO 15189 (M075), KF.TDM.02	
Uitgevoerd door	Intern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per week op dinsdag, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker. Materiaal dient op de bepalingdag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	2,0 – 20,0 mg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	25,0 mg/L
Bepalingsgrens	1,0 mg/L 40,0 mg/L	
CTG code	072841	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: Topiramaat	
Contactpersoon	P.C.D. Bank, ziekenhuisapotheker pcd.bank@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar	
	Apotheek-laboratorium@nwz.nl tel: 088-085 3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

17-05-2024 PB:
Hyperlinks hersteld
Contactpersoon aangepast
Link naar 'Verklaring in-huis ontwikkelde in-vitro diagnostiek' toegevoegd

Kwaliteitssysteem toegevoegd